

## KRZESŁO PROF. REHABILITACYJNE KULIK SYSTEM® MODEL CLASSIC I CLASSIC PRO\* INFORMACJE O PRODUKCIE

**Wytwórca:** Gabinet Terapii Manualnej i Bioenergoterapii KULIK SYSTEM®, PL 31-523 Kraków, ul. Beliny-Prądmowskiego 17/13; Biuro Handlowe KULIK SYSTEM®, ul. Kasprowicza 32, 31-532 Kraków tel./fax (+48) 12 411 22 23, tel. +48 12 411 22 32, www.kuliksystem.pl, e-mail: biuro@kuliksystem.pl.

**Cel stosowania:** Krzesło profilaktyczno-rehabilitacyjne ma na celu zarówno profilaktykę, jak i czynne działanie zmierzające do przywrócenia właściwego ułożenia pozycji kręgosłupa. Krzesło to ma na celu przywrócenie prawidłowości krzywizn kręgosłupa oraz anatomiczne ułożenie łopatek, wymuszając zachowanie takiego stanu przez cały czas użytkowania.

**Wskazania:** Zaleca się używanie produktu w celu prawidłowego ułożenia kręgosłupa na całej jego długości jak również zmniejszenia ryzyka powstawania nowych schorzeń kręgosłupa oraz łagodzenia już istniejących. Krzesło to jest przeznaczone dla chorych na lumbago, rwę kulszową i inne zespoły bólowo-korzeniowe, a także dla osób ze zniekształceniami kręgosłupa. Ma ono na celu ułatwienie przyjęcie prawidłowej pozycji anatomicznej osobie siedzącej.

**Przeciwwskazania:** Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu, skolioza patologiczna, skolioza strukturalna trzeciego stopnia, powiększona lordoza, osobom mającym inne schorzenia kręgosłupa lub w razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości zaleca się konsultację u lekarza specjalisty lub chiropraktyka.

**Efekty uboczne:** Nie stwierdzono.

**Niewłaściwe użytkowanie:** Producent nie bierze odpowiedzialności za zużycie i wady powstałe podczas niewłaściwego stosowania produktu.

**Okres gwarancji:** 2 lata od daty zakupu.

**Składniki:** Elementy tapicerowane: pianka poliuretanowa wysokoelastyczna, tkanina tapicerska 14% bawełna, 86% poliester. Elementy konstrukcji: tworzywo PP, PE, oraz stal.

**Sposób czyszczenia i suszenia:** Plamy i zabrudzenia tapicerki należy usuwać za pomocą miękkiej ściereczki oraz roztworu wody i mydła (temp. 30°C), ewentualnie łagodnych środków czyszczących; suszyć w temperaturze pokojowej. Części z tworzyw sztucznych czyścić przy pomocy ogólnodostępnych nierusających środków czystości.



**Uwaga:** Nie należy czyścić agresywnymi środkami chemicznymi zawierającymi rozpuszczalniki i wybielacze.

**Odporność na zmienne warunki środowiska:** Chronić przed bezpośrednim wpływem warunków zewnętrznych (zamoczenie, wystawianie na słońce, długotrwały wpływ mrozu).

**Wyrób medyczny. Deklaracja zgodności:** Krzesło profilaktyczno-rehabilitacyjne jest zgodne z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (DZ.U.NR 107, poz 679) i jest klasy 1 reguła 1 a wytwórca potwierdza, że postępuje zgodnie z załącznikiem I i IV Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 roku w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych różnego przeznaczenia.

\* Krzesło Classic Pro zawiera regulowane podłokietniki i wysów siedziska.

## KRZESŁO PROF. REHABILITACYJNE KULIK SYSTEM® MODEL CLASSIC I CLASSIC PRO\* INSTRUKCJA MONTAŻU

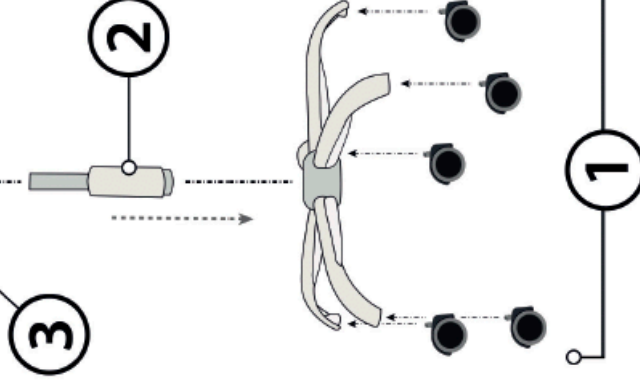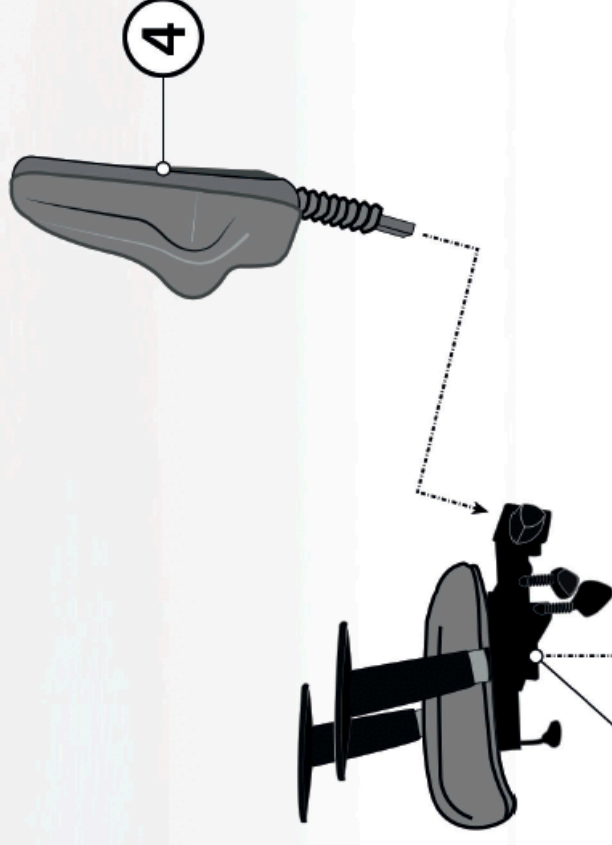

### INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Kółka wcisnąć w otwory podstawy (5szt).
2. Wcisnąć amortyzator w otwór podstawy.
3. Nakładamy siedzisko wraz z mechanizmem i zamontowanymi podłokietnikami na amortyzator lekko dociskając.
4. Oparcie wsuwamy w otwór wystający z mechanizmu siedziska i dokręcamy śrubą wystającą z boku.