


SYSTEM ZDROWEGO SIEDZENIA:

Warunkiem prawidłowego działania Systemu jest poprawne dopasowanie krzesła do sylwetki.

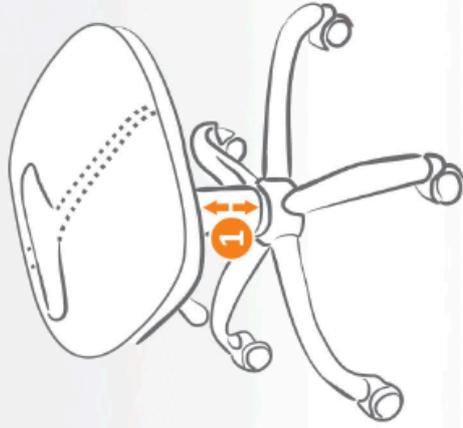

1 Za pomocą dźwigni po prawej stronie dopasuj wysokość amortyzatora, stopy powinny swobodnie spoczywać na ziemi.



Specjalny kształt siedziska pozwala na **odciążenie guzów kulszowych**, co powoduje powrót miednicy do prawidłowej, fizjologicznej pozycji.

Uwaga: Prosimy pamiętać, że krzesło należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem. Jest ono przeznaczone dla jednej osoby. Nie wolno na nim stawać. Nie należy pozostawiać w miejscach o dużej wilgotności powietrza czy też w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła.

Maksymalne obciążenie dla krzesła wynosi 110 kg.

Demontaż lub montaż jakichkolwiek elementów krzesła może spowodować utratę gwarancji, oraz niewłaściwe działanie medyczne krzesła.

Producent udziela 24 miesiące gwarancji na elementy mechaniczne oraz wady ukryte powstałe w momencie produkcji.

Reklamacje należy zgłaszać pod nr tel. 0-12 411 22 23 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.

System, według którego skonstruowane są nasze krzesła, został zgłoszony w urzędzie patentowym. Krzesła są zarejestrowane jako Wyrób Medyczny w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie.



**KULIK
SYSTEM**
WWW.KULIKSYSTEM.COM

**KRZESŁO PROF. REHABILITACYJNE K2
MODEL HANDY I HANDY PRO***

INFORMACJE O PRODUKCIE / INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I MONTAŻU

System odciążenia
kręgosłupa



System wentylacji
organów miednicy.

BIURO HANDLOWE KULIK SYSTEM
ul. Kasprzowicza 32 31-523 Kraków



Przed użyciem zapoznaj się z opisem produktu, instrukcją użytkowania oraz treścią, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych oraz informacje dotyczące używania wyrobu medycznego. Stosowanie podanych wskazówek przy codziennej eksploatacji produktu pozwoli na jego długotrwałe i zgodne z przeznaczeniem użytkowanie. Wydanie II CZERWIEC 2015.